


INSTRUCTIONS

CHANGER LA LANGUE DU ZOLL AED 3

Maintenir le bouton marche / arrêt (>5 sec)
jusqu'à que le logo ZOLL s'affiche à l'écran en
attente de la fenêtre de saisie.

1

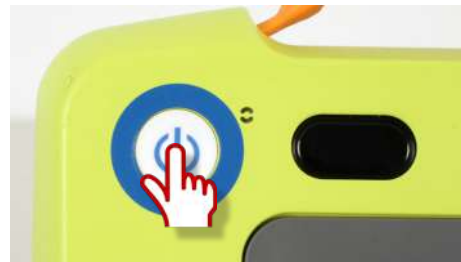

Cliquez sur l'icône CONFIGURATION

2



Cliquez sur l'icône LANGUE

3



INSTRUCTIONS

CHANGER LA LANGUE DU ZOLL AED 3

Sélectionnez la langue souhaitée puis sauvegarder

4



Pressez sur le bouton marche / arrêt pendant 2 secondes de l'AED 3. Le processus d'arrêt en cours s'affiche à l'écran.

5

